

INSTRUÇÕES DE USO DA CÂNULA PARA PUNÇÃO DE RESERVATÓRIO ONKOSTICK®

Introdução:

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos e enfermeiras. Por favor, faça referência ao manual de procedimentos de sua instituição para checar os métodos aprovados do cuidado com a punção de reservatório.

Indicações de uso:

As cânulas estão indicadas para punção de reservatório do cateter totalmente implantável para infusão de quimioterapia, nutrição parenteral, tratamento da dor, coleta ou perfusão de sangue, preservando assim a rede venosa periférica e reduzindo a troca regular de cateteres periféricos.

Mecanismo de ação e descrição detalhada do produto:

*Cânula:

A cânula para punção de reservatório é fabricada em aço inoxidável AISI 304 em um ângulo tangencial. O aço inoxidável utilizado atende as normas previstas na normatização ISO 683/13 e tem alta resistência à corrosão.

*Asas:

As Cânulas para punção de reservatório com extensão possuem asas para possibilitar uma melhor fixação e posicionamento da cânula e são removíveis. São feitas em PVC em acordo com a normatização ISO 6009.

*Extensão:

A extensão está conectada à cânula graças a uma junção em ABS Lustran que impede a rotação. A extensão é fabricada em PVC transparente. A pinça é fabricada em polipropileno de alta densidade.

Advertências e esclarecimentos sobre o produto bem como seu armazenamento e transporte:

- Estéril e apirrogênico somente se a embalagem não estiver aberta ou danificada.
- Não reesterilize a cânula por qualquer método.
- Esterilizado a óxido de etileno.
- Validade da esterilização: 03 anos.
- Produto de reprocessamento proibido conforme item 01 da RE2605 de 2006.
- Para uso somente por pessoal autorizado e familiarizado com os procedimentos.
- Técnicas rigorosamente assépticas devem ser usadas durante o procedimento de punção para a introdução do produto.
- Descarte a cânula conforme RDC 222 de 28 de março de 2018 da ANVISA.
- Observe sempre a data de validade do produto.
- Leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar a cânula.
- Armazene e transporte o produto em local seco, limpo, protegido da luz e em temperaturas entre 5° e 40°C.

Contra-indicações:

Alguns solventes são incompatíveis com a cânula, tais como:

- aminas aromáticas
- diclorometano
- clorofórmio
- fenol 5%
- Dimetilsulfóxido (DMSO)

Efeitos adversos:

Não se aplica.

Precauções:

- Nunca utilize a cânula para punção em uma região infectada.
- Utilize preferencialmente o diâmetro de 22G para infusões que não necessitem de grandes volumes para uma melhor preservação do septo. Para infusões de grandes volumes, sangue e derivados, utilize preferencialmente cânulas de 19G de diâmetro.
- Nunca force a infusão em um cateter obstruído.
- Nunca infunda soluções diferentes devido ao risco de interação medicamentosa ou precipitação. Infunda solução salina internamente, por toda cânula, entre soluções.
- Antes de administrar qualquer solução medicamentosa, verifique a compatibilidade da mesma com o PVC, pois o produto contém PVC em sua fabricação.

Instruções para punção:

- Utilize técnicas assépticas durante os procedimentos descritos abaixo: isto inclui o uso de luvas, máscara, campos e instrumentos estéreis.
- Posicione o paciente em decúbito dorsal com a cabeça virada para o lado oposto ao da punção.
- Faça uma desinfecção no local de punção. Observe se o local não apresenta sinais de infecção.
- Preencha a cânula em toda a sua extensão com solução salina com o objetivo de expelir o ar e testar a integridade do produto.
- Localize o reservatório através de palpação.
- Mantenha o reservatório firme entre dois dedos.
- Introduza a cânula no centro do reservatório, perpendicularmente à pele.

- Atravesse lentamente a pele, o septo até que a cânula toque a base do reservatório.
- Fixe a cânula na pele com curativo transparente.
- Abra a pinça e inicie a infusão lenta e suavemente.
- Ao final da infusão, lave e preencha o cateter com solução.(de acordo com o protocolo do hospital).
- Retire a cânula.

Instruções para coleta de sangue:

- Siga os mesmos passos da instrução anterior.
- Colete 5 ml de sangue.
- Lave imediatamente toda a extensão da cânula com solução salina e preencha o cateter com solução.(de acordo com o protocolo do hospital).

Informações técnicas:

- Embalado em um lado papel Tyvek® e outro lado em polietileno.
- Cada embalagem contém:



01 cânula para punção de reservatório com extensão 20 cm em , XXG x YY mm ,Curva, 90°


Tamanhos disponíveis:

Código	Descrição	Diâmetro externo (G)	Comprimento (mm)
OL1915	Cânula para punção de reservatório	19	15
OL1920	Cânula para punção de reservatório	19	20
OL1925	Cânula para punção de reservatório	19	25
OL1932	Cânula para punção de reservatório	19	32
OL2015	Cânula para punção de reservatório	20	15
OL2020	Cânula para punção de reservatório	20	20
OL2025	Cânula para punção de reservatório	20	25
OL2032	Cânula para punção de reservatório	20	32
OL2215	Cânula para punção de reservatório	22	15
OL2220	Cânula para punção de reservatório	22	20
OL2225	Cânula para punção de reservatório	22	25
OL2232	Cânula para punção de reservatório	22	32



1. Pinça
2. Extensão
3. Conector luer lock
4. Cânula
5. Asa

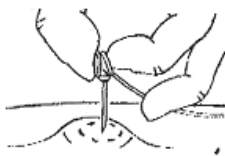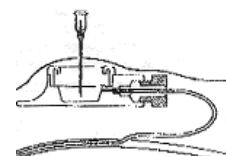

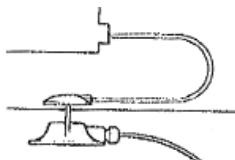**Fornecedor:**

HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-124
SAC:(31) 36881901/ (31) 36881910

Fabricante:

VitalAire GmbH
Bornbarch 2 - 22848 - Norderstedt - Alemanha

Responsável técnico:

Enfª. Vanessa Alves dos Santos
COREN MG: 644.853-ENF

ANVISA nº: 10289680196

Legenda da simbologia da rotulagem:

**Lote
Data de
fabricação**



Data de Validade

REF

Referência

Versão da instrução de uso – Vr.02

Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido.

Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: qualidade@medika.com.br.