

INSTRUÇÕES DE USO PARA A CÂNULA PARA PUNÇÃO DE RESERVATÓRIO FADICAT

Introdução:

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos. Por favor, faça referência ao manual de procedimentos de sua instituição para checar os métodos aprovados para o uso cânula de punção de reservatório.

Indicações:

As cânulas estão indicadas para punção de reservatório do cateter totalmente implantável para infusão de quimioterapia, nutrição parenteral, tratamento da dor, coleta ou perfusão de sangue, preservando assim a rede venosa periférica e reduzindo a troca regular de cateteres periféricos.

Descrição do produto:

*Cânula:

A cânula para punção de reservatório é fabricada em aço inoxidável AISI 304 em um ângulo tangencial de 90. Disponível nos diâmetros 18;19;20;21;22;23 e 24G por 15; 20; 25; 30 e 38 mm de comprimento.

*As asas:

As Cânulas para punção de reservatório com extensão possuem asas para possibilitar uma melhor fixação e posicionamento da cânula. São feitas em Poliuretano.

*Extensão:

A extensão é fabricada em Poliuretano transparente e possui pinça e conector luer lock.

Informação, precauções e restrições do produto:

- Produto de reprocessamento proibido conforme item 1 da RE2605 de 2006.
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Técnicas rigorosamente assépticas devem ser usadas durante os procedimentos de inserção, manutenção e remoção da cânula.
- O tempo de permanência da cânula é de curto prazo e deve seguir o protocolo do hospital.
- Os materiais perfuro cortantes devem ser descartados conforme item 14 da RDC 306, de 07 de Dezembro de 2004, da ANVISA.
- Nunca utilize a cânula para punção em uma região infectada.
- Nunca force a infusão em um cateter obstruído.
- Nunca infunda soluções diferentes devido ao risco de interação medicamentosa ou precipitação. Infunda solução salina internamente, por toda cânula, entre soluções.
- Antes de administrar qualquer solução medicamentosa, verifique a compatibilidade da mesma com o poliuretano.
- Ao fazer a heparinização, mantenha uma pressão positiva para evitar o refluxo de sangue pela cânula.
- A cânula deve penetrar perpendicularmente no reservatório.
- Armazene e transporte o produto em local seco, limpo, protegido da luz e em temperaturas menores de 32°C.

Advertências:

- A lei restringe o uso deste material por um ou sob ordem de um médico.
- Para uso somente por pessoal autorizado e familiarizado com os procedimentos.
- Utilizar seringas de 10 ml ou com volume superior com o objetivo de evitar submeter o septo do reservatório a altas pressões.
- Não exceda pressão igual ou superior a 2000mmHg ao administrar fluidos pela cânula.

Contraindicações:

Não aplicável

Efeitos adversos:

Não aplicável

Instruções de uso:

- Utilize técnicas assépticas durante os procedimentos descritos abaixo: isto inclui o uso de luvas, máscara, campos e instrumentos estéreis.
- Posicione o paciente em decúbito dorsal com a cabeça virada para o lado oposto ao da punção.
- Faça uma desinfecção no local de punção de acordo com o protocolo do hospital. Observe se o local não apresenta sinais de infecção.
- Preencha a cânula em toda a sua extensão com 10 ml de solução salina com o objetivo de expelir o ar e testar a integridade do produto.
- Localize o reservatório através de palpação.
- Mantenha o reservatório firme entre dois dedos.
- Introduza a cânula no centro do reservatório, perpendicularmente à pele.
- Atravesse lentamente a pele, o septo até que a cânula toque a base do

reservatório.

-Verifique a permeabilidade do cateter.

-Fixe a cânula na pele com curativo transparente.

-Abra a pinça e inicie a infusão lenta e suavemente.

-Ao final da infusão, lave e preencha o cateter com solução.(de acordo com o protocolo do hospital).

-Retire a cânula.

Instruções para coleta de sangue:

-Siga os mesmos passos da instrução anterior.

-Colete 5 ml de sangue.

-Lave imediatamente toda a extensão da cânula com solução salina e preencha o cateter com solução.(de acordo com o protocolo do hospital).

-Os materiais perfuro cortantes devem ser descartados conforme item 14 da RDC 306, de 07 de Dezembro de 2004, da ANVISA.


Informações técnicas:

Embalagem secundária: caixa de papel couché (composto de papel base, caulim, carbonato de cálcio e látex) 350g/cm. Cada embalagem secundária contém 50 embalagens primárias.

Embalagem primária: Embalado em um lado Tyvek® (membrana composta 100% de polietileno, sem aditivos) e o outro lado transparente em PET (politereftalato de etileno).

01 cânula para punção de reservatório com extensão 16 cm em Poliuretano, XX G x YY mm ,Curva, 90°.

Código	Descrição	Diâmetro externo	Comprimento
SEIN1815	Cânula para punção de reservatório Fadicat	18G	15 mm
SEIN1820	Cânula para punção de reservatório Fadicat	18G	20 mm
SEIN1825	Cânula para punção de reservatório Fadicat	18G	25 mm
SEIN1830	Cânula para punção de reservatório Fadicat	18G	30 mm
SEIN1838	Cânula para punção de reservatório Fadicat	18G	38 mm
SEIN1915	Cânula para punção de reservatório Fadicat	19G	15 mm
SEIN1920	Cânula para punção de reservatório Fadicat	19G	20 mm
SEIN1925	Cânula para punção de reservatório Fadicat	19G	25 mm
SEIN1930	Cânula para punção de reservatório Fadicat	19G	30 mm
SEIN1938	Cânula para punção de reservatório Fadicat	19G	38 mm
SEIN2015	Cânula para punção de reservatório Fadicat	20G	15 mm
SEIN2020	Cânula para punção de reservatório Fadicat	20G	20 mm
SEIN2025	Cânula para punção de reservatório Fadicat	20G	25 mm
SEIN2030	Cânula para punção de reservatório Fadicat	20G	30 mm
SEIN2038	Cânula para punção de reservatório Fadicat	20G	38 mm
SEIN2115	Cânula para punção de reservatório Fadicat	21G	15 mm
SEIN2120	Cânula para punção de reservatório Fadicat	21G	20 mm
SEIN2125	Cânula para punção de reservatório Fadicat	21G	25 mm
SEIN2130	Cânula para punção de reservatório Fadicat	21G	30 mm
SEIN2138	Cânula para punção de reservatório Fadicat	21G	38 mm
SEIN2215	Cânula para punção de reservatório Fadicat	22G	15 mm
SEIN2220	Cânula para punção de reservatório Fadicat	22G	20 mm
SEIN2225	Cânula para punção de reservatório Fadicat	22G	25 mm
SEIN2230	Cânula para punção de reservatório Fadicat	22G	30 mm
SEIN2238	Cânula para punção de reservatório Fadicat	22G	38 mm
SEIN2315	Cânula para punção de reservatório Fadicat	23G	15 mm
SEIN2320	Cânula para punção de reservatório Fadicat	23G	20 mm
SEIN2325	Cânula para punção de reservatório Fadicat	23G	25 mm
SEIN2330	Cânula para punção de reservatório Fadicat	23G	30 mm
SEIN2338	Cânula para punção de reservatório Fadicat	23G	38 mm
SEIN2415	Cânula para punção de reservatório Fadicat	24G	15 mm
SEIN2420	Cânula para punção de reservatório Fadicat	24G	20 mm
SEIN2425	Cânula para punção de reservatório Fadicat	24G	25 mm
SEIN2430	Cânula para punção de reservatório Fadicat	24G	30 mm
SEIN2438	Cânula para punção de reservatório Fadicat	24G	38 mm

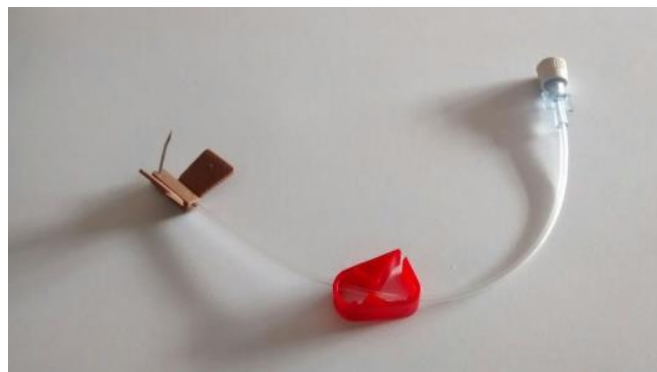

Fabricante:

KFF S.A
Espora 41 - Sarandi - Buenos Aires
Argentina - Tel: 541142654515

Fornecedor:

HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-124
SAC:(31) 36881901 Fax: (31) 36881910
qualidade@medika.com.br
www.medika.com.br

Responsável técnico:

Enfª. Vanessa Alves dos Santos
COREN MG: 644.853-ENF

ANVISA nº: 10289680117

Legenda da simbologia da rotulagem:

Lote



**Data de
fabricação**



Data de Validade

REF

Referência

Versão da instrução de uso – Vr.02

Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido.

Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: qualidade@medika.com.br.