

Dispositivo para Insuflação

QL

Informações técnicas:

Indicado para execução de procedimentos cirúrgicos, com o objetivo de insuflar o balão, monitorizar a pressão no interior do balão e desinsuflar o balão.

O Dispositivo de insuflação descartável, constituído por uma peça única de plástico, com um manipulador de bloqueio concebido para controlar o êmbolo, um manómetro e um tubo conector de alta pressão com um adaptador rotativo macho. Uma torneira de passagem de 3 vias pode ser utilizada durante a preparação do dispositivo. O manómetro mede pressões que vão desde o vácuo até à capacidade indicada no manómetro; a escala do manómetro está dividida em secções de 1 atm. O manómetro tem uma segunda escala, interna, com os valores PSI equivalentes. A exatidão do manómetro foi verificada como correspondendo a 1 atm na amplitude total da escala.



Dispositivo para Insuflação

QL

CÓDIGO	CAPACIDADE DA SERINGA	TAXA DE PRESSÃO
QL1015	10 mL	15 atm
QL1030	10 mL	30 atm
QL1430	14 mL	30 atm
QL1455	14 mL	55 atm
QL2015	20 mL	15 atm
QL2020	20 mL	20 atm
QL2030	20 mL	30 atm
QL2525	25 mL	25 atm
QL2530	25 mL	30 atm
QL2540	25 mL	40 atm
QL4015	40 mL	15 atm
QL6015	60 mL	15 atm

