

INSTRUÇÕES DE USO PARA O CATETER MOUNT DUPLO GIRATÓRIO TRIFANZ

Cateteres

Introdução:

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos. Por favor, faça referência ao manual de procedimentos de sua instituição para checar os métodos aprovados para o uso do Cateter Mount.

Indicações:

O Cateter Mount está indicado para a utilização com o sistema respiratório do paciente para reduzir a torção na sonda endotraqueal. Permite ao profissional posicionar o filtro HMEF longe do rosto do paciente e ter acesso ao sistema respiratório do paciente através de uma das extremidades do Cateter.

Descrição do produto:

O Cateter Mount está indicado para a utilização com o sistema respiratório do paciente para reduzir a torção na sonda endotraqueal. Permite ao profissional posicionar o filtro HMEF longe do rosto do paciente e ter acesso ao sistema respiratório do paciente através de uma das extremidades do cateter. Cateter fabricado em PVC macio, nos modelos corrugado e expansível, com conector em cotovelo em uma extremidade, duplo giratório, com tubo de 15 ou 20 cm e conector reto em outra extremidade.

Informação e condições de manipulação:

Esterilizado a óxido de etileno.
Validade da esterilização: 05 anos
O fabricante recomenda um uso único.
O Cateter Mount é de uso de curto prazo.
Observe sempre a data de validade do produto.
Leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar o Cateter Mount.
Não utilize o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada.
Verifique a integridade do produto antes de utilizá-lo.
O produto deve ser descartado conforme RDC 222, de 28 de março de 2018, da ANVISA.

Contraindicações:

Não se aplica

Efeitos adversos:

Não se aplica

Advertências e precauções:

Para utilização apenas por profissional habilitado e autorizado para o procedimento.

Instruções de uso:

Utilize técnicas assépticas durante os procedimentos descritos abaixo: isto inclui o uso de luvas, máscara, campos e instrumentos estéreis.
Escolha o modelo e tamanho adequados do Cateter Mount.
Conecte uma extremidade ao sistema de ventilação (vendido separadamente) e a outra extremidade à sonda endotraqueal (vendida separadamente).
O produto deve ser descartado conforme RDC 222, de 28 de março de 2018, da ANVISA.

Formas de apresentação:

Embalagem secundária: caixa de papel couché (composto de papel base, caulim, carbonato de cálcio e látex) 350g/cm. Cada embalagem secundária contém 100 ou 200 embalagens primárias.

Embalagem primária: Embalado em um lado papel grau cirúrgico gramatura 80 gm² e o outro lado transparente em PE (polietileno).

Cada embalagem primária contém:

01 Cateter Mount expansível ou corrugado com conector em cotovelo em uma extremidade, duplo giratório, com tubo de 15 ou 20 cm e conector reto em outra extremidade;

Código do Produto

Modelo expansível:

96.06.527 - Cateter Mount expansível com conector em cotovelo em uma extremidade, duplo giratório, com tubo de 15 cm e conector reto em outra extremidade;

96.06.531 - Cateter Mount expansível com conector em cotovelo em uma extremidade, duplo giratório, com tubo de 20 cm e conector reto em outra extremidade;

Modelo corrugado:

96.06.535 - Cateter Mount corrugado com conector em cotovelo em uma extremidade, duplo giratório, com tubo de 15 cm e conector reto em outra extremidade;

96.06.539 - Cateter Mount corrugado com conector em cotovelo em uma extremidade, duplo giratório, com tubo de 20 cm e conector reto em outra extremidade;

Fabricante:

Hangzhou Trifanz Medical Device Co. Ltd.
Room 501-1 n.488-1 Donghu North Road, Yuhang district, Hangzhou city, Zhejiang - China

Fornecedor:

HTS-Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-124
SAC:(31) 36881901 Fax:(31)36881910

Responsável técnico:

Enf^a. Vanessa Alves dos Santos
COREN MG: 644.853-ENF

ANVISA nº: 10289680216

Legenda da simbologia da rotulagem:



Lote



Data de fabricação



Data de Validade

REF

Referência



Esterilizado por óxido de etileno

Versão da instrução de uso – Vr.02

Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido.

Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: qualidade@medika.com.br.