

Bolsa Infusora de Pressão

Infuse IT

Informações técnicas:

Indicada para inserção de uma bolsa de infusão de soluções intravasculares, permitindo uma infusão rápida com pressão controlada, em procedimentos de radiologia, terapia intensiva, obstetrícia, cirurgia, cardiologia e setores de emergência.

Fabricada em tecido especial composto de nylon em um lado e poliuretano, compatível com bolsas de solução intravasculares de volumes de 500, 1000 e 3000 ml. A bolsa de soluções intravasculares é inserida dentro da bolsa InfuseIT, que criará uma compressão na bolsa de soluções intravasculares, de forma que essa solução seja infundida rapidamente, com controle de pressão através de um indicador, identificado por cores de aviso amarela (de 0 a 175 mmHg), verde (até 300 mmHg) e vermelha (acima de 300 mmHg pressão excessiva). Quando o indicador atinge a coloração vermelha, uma válvula automática interna irá reduzir a pressão a um nível seguro. A bolsa InfuseIT possui uma torneira de três vias para insuflação e desinsuflação do ar contido na bolsa, utilizado para a compressão, por meio de uma bomba de insuflação em PVC.

A utilização da bolsa é transitória (<60 min).



Bolsa Infusora de Pressão

Infuse IT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ZIT-500	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 500 ml, com torneira de três vias e indicador de pressão.
ZIT-1000	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 1000 ml, com torneira de três vias e indicador de pressão.
ZIT-3000	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 3000 ml, com torneira de três vias e indicador de pressão.

