

# INSTRUÇÕES DE USO PARA A VÁLVULA DE HEIMLICH PARA DRENAGEM EXTERNA TORÁCICA PNEUMOVENT

## Dispositivos

### Introdução:

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos. Por favor, faça referência ao manual de procedimentos de sua instituição para checar os métodos aprovados para o uso da válvula de Heimlich.

### Indicações:

A válvula de Heimlich PneumoVent está indicada para conexão em cateteres torácicos de drenagem, para a prevenção da entrada de ar na cavidade torácica.

### Descrição do produto:

A válvula de Heimlich, fabricada em ABS Lustran, permite a passagem de fluido ou ar em apenas uma direção, valendo-se de duas membranas de borracha; tem como vantagens funcionar em qualquer posição, não correndo o risco de derramar, vazar, refluir ou formar bolhas que obstruam o cateter e o tubo de drenagem. A válvula conecta-se, de um lado, ao cateter torácico e de outro lado, se aplicável, a um tubo de drenagem. Disponível nos modelos com conexão universal em ambos os lados e com conexão universal de um lado e conexão luer lock do outro lado.

### Informação e condições de manipulação:

- Técnicas rigorosamente assépticas devem ser usadas durante o procedimento de conexão e desconexão da válvula.
- O fabricante recomenda uso único.
- Estéril e apirogênico somente se a embalagem não estiver aberta ou danificada.
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Validade da esterilização: 05 anos.
- O tempo de permanência da válvula é de curto prazo.
- Armazene e transporte o produto em local seco, limpo, protegido da luz e em temperaturas entre 15 e 40°C e umidade abaixo de 75%.
- Não utilize soluções alcoólicas para a limpeza externa da válvula.
- Descarte o cateter conforme a RDC 306, de 07 de Dezembro de 2004, da ANVISA.

### Contra indicações:

Não se aplica

### Efeitos adversos:

Não se aplica

### Advertências e precauções:

-Manusear a válvula sempre em condições estéreis.  
ATENÇÃO: a direção do fluxo da válvula é no sentido externo ao paciente.  
-No caso de drenagem de fluidos através da válvula de Heimlich PneumoVent, observe se a válvula está obstruída. Nesse caso, troque a válvula.

### Instruções de uso:

- Utilize técnicas assépticas durante os procedimentos descritos abaixo: isto inclui o uso de luvas, gorro, máscara, campos e instrumentos estéreis.
- Abra a embalagem e confira a integridade do produto.
- Confira se o cateter torácico (vendido separadamente) está corretamente posicionado.
- Após a implantação de um cateter torácico (vendido separadamente), indicado para drenagem, conecte a válvula PneumoVent, previamente selecionada, de acordo com o tipo de conexão.
- ATENÇÃO: a direção do fluxo da válvula é no sentido externo ao paciente.
- Descarte o cateter conforme a RDC 306, de 07 de Dezembro de 2004, da ANVISA.

### Formas de apresentação:

Embalagem secundária: caixa de papel couché (composto de papel base, caulim, carbonato de cálcio e látex) 350g/cm. Cada embalagem secundária contém 20 embalagens primárias.

Embalagem primária: Embalado em um lado papel grau cirúrgico gramatura 80 gm² e o outro lado transparente em PEAD (polietileno de alta densidade). Cada embalagem primária contém:

01 válvula de Heimlich para drenagem torácica com conexão xx

## Código Produto

504001 - Válvula para drenagem externa torácica com conexão universal em um lado e conexão luer lock em outro lado

504002 - Válvula para drenagem externa torácica com conexão universal em ambos os lados

### Fabricado por:

Intra Gmbh  
Oststrasse 2-Rehlingen -66.780  
Alemanha – Telefax:49 0683568034

### Fornecedor:

HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda  
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-124  
SAC:(31) 36881901/ (31) 36881910  
www.medika.com.br  
Email: qualidade@medika.com.br

### Responsável técnico:

Enfª. Vanessa Alves dos Santos  
COREN MG: 644.853-ENF

ANVISA nº: 10289680179

### Legenda da simbologia da rotulagem:



Lote



Data de fabricação



Data de Validade

REF

Referência

|             |        |
|-------------|--------|
| STERIL<br>E | E<br>O |
|-------------|--------|

Esterilizado por óxido de etileno

### Versão da instrução de uso – Vr.02

**Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido.**

**Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: [qualidade@medika.com.br](mailto:qualidade@medika.com.br).**