

INSTRUÇÕES DE USO PARA A CÂNULA PARA IRRIGAÇÃO E SUCÇÃO COM MANGUEIRA LAGIS®

Introdução:

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos. Por favor, faça referência ao manual de procedimentos de sua instituição para checar os métodos aprovados para o uso da cânula para irrigação e sucção com mangueira Lagis.

Indicações:

A cânula está indicada para lavar os tecidos e aspirar resíduos em procedimentos endoscópicos como a cirurgia laparoscópica.

Descrição do produto:

A cânula de irrigação e sucção consiste em uma cânula fabricada em aço inoxidável com 05 mm de diâmetro com 08 orifícios na extremidade distal, conectada por rosqueamento à uma empunhadura de policarbonato que possui uma válvula ativada por uma mola e um tampão (pistão) e esta empunhadura se liga a uma mangueira dupla de PVC de 2,72 m que possui conexão universal para sistemas de drenagem e também para conexão a 02 bolsas de infusão. Quando o operador utiliza a cânula, inicialmente a cânula e mangueiras são conectadas às bolsas de infusão e a um sistema de pressão negativa. Daí o operador aciona o pistão identificado para sucção ou para irrigação, conforme sua intenção.

Informação, precauções e restrições do produto:

- estéril e apirrogênico somente se a embalagem não estiver aberta ou danificada.
- esterilizado a óxido de etileno.
- O fabricante recomenda um só uso.
- A lei restringe o uso deste material por um médico.
- Para uso somente por médico e familiarizado com os procedimentos.
- Técnicas rigorosamente assépticas devem ser usadas durante os procedimentos de irrigação e sucção.
- Confira a compatibilidade da cânula de irrigação e sucção com instrumentais de outros fabricantes.
- Verifique as conexões para os reservatórios de fluidos e a conexão ao probe, para evitar vazamentos de líquidos.
- A utilização da cânula é transitória (<60 min).
- Armazene e transporte o produto em local seco, limpo, protegido da luz e em temperaturas menores que 35°C.
- Leia todas as informações antes de utilizar o sistema de irrigação e sucção Lagis.
- A cânula para irrigação e sucção e mangueira devem ser descartadas conforme a RDC 306, de 07 de Dezembro de 2004, da ANVISA.

Contra indicações:

Não se aplica.

Complicações:

- As complicações incluem os riscos associados ao grau de intolerância ao procedimento cirúrgico ou à medicação usada durante o procedimento.
- Infecção.
- Lesão visceral e vascular.

Prevenção para complicações:

- Monitore o paciente adequadamente.
- Verifique as conexões para os reservatórios de fluidos e a conexão ao probe, para evitar vazamentos de líquidos.

Instruções de uso:


- Utilize técnicas assépticas durante os procedimentos descritos abaixo: isto inclui o uso de luvas, máscara, campos e instrumentos estéreis.
- Remova a cânula de irrigação e sucção de sua embalagem e verifique a integridade da mesma e do produto e confira o seu correto funcionamento.
- Insira os conectores nas bolsas de fluidos para a irrigação.
- Preencha os tubos com a solução de fluidos desejada e feche as pinças.
- Insira o conector verde para o sistema de drenagem.
- Introduza a cânula no local desejado.
- Aperte o botão vermelho para irrigar fluidos em procedimentos laparoscópicos.
- Aperte o botão azul para aspirar fluidos em procedimentos laparoscópicos.

Informações técnicas:

-Embalagem secundária: caixa de papel cartão 350g/cm. Cada embalagem secundária contém 12 embalagens primárias.

Embalagem primária: um lado papel grau cirúrgico e o outro lado polietileno. Cada embalagem primária contém: 01 cânula descartável para sucção e irrigação em procedimentos endoscópicos,

05 mm de diâmetro x XX mm de comprimento, com mangueira em PVC para conexão em 02 bolsas.

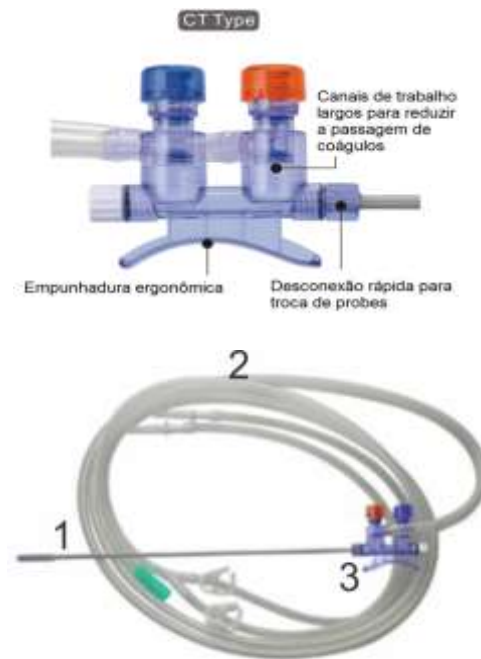

1. Cânula 2. Mangueira 3. Pistão

Fabricante:

Lagis Enterprise Co., Ltd.
Número 29, Gong 1 St. Rd; Dajia, Taichung, Taiwan - 43762
Telefax : 886-4-26880767

Fornecedor:

HTS-Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.400-000
SAC:(31) 36881901 Fax: (31) 36881910
qualidade@medika.com.br
www.medika.com.br

Responsável técnico:

Enfa. Janaína Maria de Carvalho Ferreira
COREN MG: 115.940

ANVISA nº: 10289680130

Legenda da simbologia da rotulagem:



Lote
Data de
fabricação

Data de Validade

Referência

Versão da instrução de uso – Vr.01

Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido.

Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: qualidade@medika.com.br.