

INSTRUÇÕES DE USO DA ESCOVA DE LIMPEZA PARA CANAL DE TRABALHO DO ENDOSCÓPIO JIUHONG MEDICAL

Indicações:

A escova está indicada para limpeza do canal de trabalhos de endoscópios.

Descrição do produto:

Escova para limpeza de canais de trabalho de endoscópios com 2.0, 2.8 e 3.2 mm de diâmetro, descartável, com comprimentos de tubo de 1200, 1800 e 2300 mm. O corpo da escova é fabricado em POM, com cerdas em nylon. O modelo inovador de tripla escova melhora os resultados da limpeza.

Instruções de uso:

- Este produto é utilizado para limpeza do canal de trabalho do endoscópio.
- Confira cuidadosamente se o endoscópio está em boas condições.
- Escolha a escova no tamanho adequados para o procedimento. O diâmetro externo da escova deve ser menor do que o diâmetro do canal de trabalho e o comprimento deve ser maior.
- Abra a embalagem da escova de limpeza.
- Introduza a escova de limpeza e empurre cuidadosamente pelo canal de trabalho do endoscópio.
- Puxe a escova de limpeza pela extremidade distal e retire-a do canal de trabalho do endoscópio.

Informações técnicas:

Modelo: Tripla escova			
Código	Canal de trabalho do endoscópio (mm)	Comprimento do tubo (mm)	Diâmetro da escova (mm)
JHY-CB-06-180-D	2.8-3.2	1800	06
JHY-CB-06-230-D	2.8-3.2	2300	06
JHY-CB-03-120-D	2.0	1200	03
JHY-CB- 03-180-D	2.0	1800	03

Modelo: Dupla escova

Código	Canal de trabalho do endoscópio (mm)	Comprimento do tubo (mm)	Diâmetro da escova (mm)
JHY-CB-06-180-C	2.8-3.2	1800	06
JHY-CB-06-230-C	2.8-3.2	2300	06
JHY-CB-03-120-C	2.0	1200	03
JHY-CB- 03-180-C	2.0	1800	03

A escova de limpeza para canal de trabalho de endoscópio JiuHong Medical não se enquadra como produto para saúde segundo RDC 185 de 2001.

Fabricado por:

Changzhou JiuHong Medical Instrument Co., Ltd
No.128, Mingxin West Road, Wujin District, Changzhou,
Jiangsu, China - 213164
Telefax : 0086-0519—85071234

Fornecedor:

HTS—Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-124
SAC:(31) 36881901 Fax: (31) 36881910
qualidade@medika.com.br
www.medika.com.br

Responsável técnico:

Enfª. Vanessa Alves dos Santos
COREN MG: 644.853-ENF

Legenda da simbologia da rotulagem:

LOT





REF

Lote
Data de
fabricação
Data de Validade
Referência

Versão da instrução de uso – Vr.02

Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido.
Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: qualidade@medika.com.br.