

# INSTRUÇÕES DE USO PARA A BOLSA INFUSORA DE PRESSÃO INFUSE IT®

## Sistema de infusão

### DESCRIÇÃO

Este sistema é uma bolsa em tecido especial composto de nylon em um lado e poliuretano, compatível com bolsas de solução intravasculares de volumes de 500; 1000 e 3000 ml. Esta bolsa de soluções intravasculares é inserida dentro da bolsa InfuseIT, que criará uma compressão na bolsa de soluções intravasculares, de forma que essa solução seja infundida rapidamente, com controle de pressão através de um indicador, identificado por cores de aviso amarela (de 0 a 175 mmHg), verde (até 300 mmHg) e vermelha (acima de 300 mmHg - pressão excessiva). Quando o indicador atinge a coloração vermelha, uma válvula automática interna irá reduzir a pressão a um nível seguro. A bolsa InfuseIT possui uma torneira de três vias para insuflação e desinsuflação do ar contido na bolsa, utilizado para a compressão, através de uma bomba de insuflação em PVC.

### INDICAÇÕES

Este sistema é uma bolsa em tecido especial composto de nylon em um lado e poliuretano, onde se insere uma bolsa de infusão de soluções intravasculares e cria-se uma pressão controlada para infusão rápida, em procedimentos especiais de radiologia, terapia intensiva, obstetria, cirurgia, cardiologia e setores de emergência.

### CONTRA INDICAÇÕES E EFEITOS ADVERSOS

Não se aplica.

### PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

-A utilização da bolsa é transitória (<60 min).

-Leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar a bolsa.

-Armazene e transporte o produto em local seco, limpo, protegido da luz e em temperaturas menores de 32°C.

-Produto não estéril. Validade do produto: 03 anos.

Para a limpeza da bolsa:

-Com um pano de limpeza ou uma escova suave, limpe a bolsa utilizando álcool isopropílico.

-Enxague a bolsa com água corrente.

-Não mergulhe todo o sistema em líquidos. Apenas a bolsa pode ser limpa.

-Deixe a bolsa InfuseIT secar antes da próxima utilização.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

-Escolha a bolsa InfuseIT adequada para o volume da bolsa de solução intravascular desejada.

-Introduza a bolsa de solução intravascular dentro da bolsa InfuseIT e pendure-a no gancho interno.

-Pendure a bolsa InfuseIT em um suporte adequado.

-Gire a válvula da torneira de três vias de modo que a seta fique apontada para a direita. Esta é a posição para insuflar.

-Aperte a bomba de insuflação repetidamente até o indicador de pressão atingir uma pressão de 300 mmHg. Não ultrapasse essa marca.

-Gire a válvula da torneira de três vias de modo que a seta fique apontada para cima, na direção da bolsa. Esta é a posição manter. A válvula da torneira tem que estar nessa posição durante o tempo que a pressão tiver que ser mantida.

-Para desinflar a bolsa InfuseIT gire a válvula da torneira de três vias, de modo que a seta fique apontada para baixo, na direção da bomba de insuflação. Esta é a posição desinsuflar.

### FORMAS DE APRESENTAÇÃO:

Embalagem secundária: caixa de papel cartão 350g/cm. Cada embalagem secundária contém 10 embalagens primárias.

Embalagem primária: Embalado em saco de polietileno.

Cada embalagem primária contém:

01 Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de xx ml, com torneira de três vias e indicador de pressão.

Código do produto Descrição do produto

ZIT-500 Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 500 ml, com torneira de três vias e indicador de pressão

ZIT-1000 Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 1000 ml, com torneira de três vias e indicador de pressão

ZIT-3000 Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 3000 ml, com torneira de três vias e indicador de pressão

Fabricado por: Salter Labs  
Camino Vida Roble, 2365 - Carlsbad- Califórnia- 92011 – Estados Unidos

### Distribuidor exclusivo no Brasil:

HTS-Tecnologia de Saúde-Comércio, Importação e Exportação Ltda  
Rua Aleomar Baleeiro, 15-Lagoa Santa- MG 33.230-124  
Tel: (31) 36881901 Fax: (31) 36881910

### Responsável técnico:

Enfª. Vanessa Alves dos Santos  
COREN MG: 644.853-ENF  
**ANISA nº: 10289680144**

### Legenda da simbologia da rotulagem:



**Lote**  
**Data de**  
**fabricação**  
**Data de Validade**  
**Referência**

### Versão da instrução de uso – Vr.02

**Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido.**

**Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: [qualidade@medika.com.br](mailto:qualidade@medika.com.br).**