

# INSTRUÇÕES DE USO PARA A SERINGA PLÁSTICA PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL EN FIT MEDICINA

Seringas

LPE60	60 ml	1,0 ml
LPE100	100 ml	1,0 ml

## Introdução:

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos. Por favor, faça referência ao manual de procedimentos de sua instituição para checar os métodos aprovados para o uso da seringa para nutrição oral e enteral EN FIT.

## Indicações:

As seringas estão indicadas para administração de soluções e nutrição por via oral e por via enteral em extensões, sondas e sistemas de nutrição que possuam conexão EN FIT.

## Descrição do produto:

Seringa plástica lilás, para identificação precisa de seu uso para administração de soluções e nutrição por via oral e enteral, com o sistema de segurança de conexão EN FIT. A conexão EN FIT, em atendimento à ISO 80369-3, não se encaixa em sistemas intravenosos de qualquer espécie, evitando assim o risco de causar danos ao paciente. A conexão EN FIT se encaixa com segurança à extensões, sondas e sistemas de nutrição enteral que possuem conexão EN FIT, eliminando o risco de desconexão. Disponível nos volumes com 01,2,5,5,10,20,30, 60 e 100 ml.

## Informação, precauções e restrições do produto:

- Esterilizado por óxido de etileno.
- Validade da esterilização: 05 anos.
- Para uso somente por pessoal autorizado e familiarizado com os procedimentos.
- Observe sempre a data de validade do produto.
- Estéril e apirogênico somente se a embalagem não estiver aberta ou danificada.
- Técnicas rigorosamente assépticas devem ser usadas durante os procedimentos de conexão da seringa à extensões ou à sonda de gastrostomia e equípos.
- Não force a infusão da nutrição se encontrar resistência.
- O produto é livre de DEHP (di(2-etilhexil) ftalato), BPA(Bisfenol A) e Látex.
- A seringa é destinada para nutrição oral e enteral, não sendo destinada para uso hipodérmico.
- Armazene e transporte o produto em local seco e limpo, temperatura abaixo de 32 C e umidade abaixo de 75%.
- Produto de reprocessamento proibido conforme item 57 da RE2605/2006.
- Descarte a seringa conforme item 8.1.2 da RDC 306, de 07 de Dezembro de 2004, da ANVISA.

## Contra indicações:

Não se aplica.

## \*Complicações:

-Não se aplica

## Instruções de uso:

- Utilize técnicas estéreis durante os procedimentos descritos abaixo.
- Preencha a seringa com a nutrição ou solução prescrita utilizando uma conexão EN FIT.
- Conecte a seringa à extensão, sonda ou sistema de nutrição enteral que possuem conexão EN FIT escolhida ou diretamente na boca do paciente.
- Inicie a administração.
- Descarte o produto conforme RDC 306 de 07 de Dezembro de 2004, da ANVISA.

## Informações técnicas:

Embalagem secundária: caixa de papel cartão 350g/cm. Cada embalagem secundária contém 100 embalagens primárias.

Embalagem primária: Embalado em um lado papel grau cirúrgico e outro lado polietileno.

-Cada embalagem primária contém:

01 Seringa plástica para nutrição oral e enteral com conexão EN FIT xx ml, graduada em yy ml (seringa destinada à nutrição oral e enteral, não sendo de uso hipodérmico)

Código	Volume da Seringa	Graduação
LPE01L	01 ml	0,2 ml
LPE01LD	01 ml	0,1 ml
LPE25	2,5 ml	0,2 ml
LPE25LD	2,5 ml	0,1 ml
LPE05	5,0 ml	0,2 ml
LPE10	10 ml	0,2 ml
LPE20	20 ml	1,0 ml
LPE30	30 ml	2,0 ml



## Fabricante:

Medicina Ltd.  
Unit 2, Rivington View Business Park, Station Road -Bolton BL6 5BN  
Tel: 01204695050 – Reino Unido

## Fornecedor:

HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda  
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-124  
SAC:(31) 36881901 Fax: (31) 36881910

ANVISA: 10289680156

## Responsável técnico:

Enfª. Vanessa Alves dos Santos  
COREN MG: 644.853-ENF

## Legenda da simbologia da rotulagem:



Lote



Data de fabricação



Data de Validade

REF

Referência



Esterilizado a Óxido de Etileno

## Versão da instrução de uso – Vr.02

**Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido.**

**Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: [qualidade@medika.com.br](mailto:qualidade@medika.com.br).**