

INSTRUÇÕES DE USO PARA A EXTENSÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CONEXÃO EN FIT MEDICINA

Extensão

Introdução:

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos. Por favor, faça referência ao manual de procedimentos de sua instituição para checar os métodos aprovados para o uso da extensão para nutrição enteral com conexão EN FIT.

Indicações:

A extensão está indicada para a comunicação entre seringas, equipos e sondas de nutrição que possuam conexão EN FIT.

Descrição do produto:

Extensão fabricada em PVC, com faixa lilás para identificação precisa de seu uso para administração de nutrição oral e enteral, com o sistema de segurança de conexão EN FIT, macho em uma extremidade e fêmea, na outra extremidade. A conexão EN FIT, em atendimento à ISO 80369-3, não se encaixa em sistemas intravenosos de qualquer espécie, evitando assim o risco de causar danos ao paciente. A extensão faz a conexão EN FIT se encaixar com segurança à seringas, equipos e sondas, que possuam conexão EN FIT, eliminando o risco de desconexão. Disponível no diâmetro de 3 mm x 15; 75 e 150 cm de comprimento.

Informação, precauções e restrições do produto:

- Esterilizado por óxido de etileno.
- O fabricante recomenda uso único.
- Validade da esterilização: 05 anos.
- Para uso somente por pessoal autorizado e familiarizado com os procedimentos.
- Observe sempre a data de validade do produto.
- Estéril e apirrogênico somente se a embalagem não estiver aberta ou danificada.
- Armazene e transporte o produto em local seco e limpo, temperatura abaixo de 32 C e umidade abaixo de 75%.
- Leia as instruções de uso antes de utilizar o produto.
- Descarte a extensão conforme RDC 306, de 07 de Dezembro de 2004, da ANVISA.
- Evite o contato da extensão com instrumentos cortantes e pinças, pois podem perfurar o produto.
- O produto é livre de DEHP (di(2-etilhexil) ftalato), BPA(Bisfenol A) e Látex.

Contra indicações:

Não se aplica

Complicações:

Não se aplica

Instruções de uso:

- Utilize técnicas estéreis durante os procedimentos descritos abaixo.
- Conecte a extensão à seringas, equipos e sondas que possuem conexão EN FIT.
- Descarte o produto conforme RDC 306 de 07 de Dezembro de 2004, da ANVISA.

Informações técnicas:

Embalagem secundária: caixa de papel couché (composto de papel base, caulim, carbonato de cálcio e látex) 350g/cm. Cada embalagem secundária contém 50 embalagens primárias.

Embalagem primária: Embalado em um lado papel grau cirúrgico e o outro lado transparente em PEAD (polietileno de alta densidade). Cada embalagem primária contém:

01 extensão para nutrição enteral com conexão EN FIT fabricada em PVC Medicina

Códigos	Diâmetro	Comprimento	Volume
EP015L	03 mm	15 cm	0,30 ml
EP075L	03 mm	75 cm	1,10 ml
EP150L	03 mm	150 cm	2,10 ml

Fabricante:

HMC Premedical Spa.
Via Tonino Morandi, 16 - 41037 - Mirandola - Tel:39 0535 22704
Itália

Distribuidor:

Medicina Ltd.
Unit 2, Rivington View Business Park, Station Road -Bolton BL6 5BN
Tel: 01204695050 – Reino Unido

Fornecedor:

HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-124
SAC:(31) 36881901 Fax: (31) 36881910
www.medika.com.br
Email: qualidade@medika.com.br

ANVISA: 10289680172

Responsável técnico:

Enfª. Vanessa Alves dos Santos
COREN MG: 644.853-ENF

Legenda da simbologia da rotulagem:



Lote



Data de fabricação



Data de Validade

REF

Referência

STERILE

EO

Esterilizado a Óxido de Etileno

Versão da instrução de uso – Vr.02

Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido.
Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: qualidade@medika.com.br.