

INSTRUÇÕES DE USO PARA SERINGA PLÁSTICA PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL COM BICO MEDICINA

Introdução:

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos. Por favor, faça referência ao manual de procedimentos de sua instituição para checar os métodos aprovados para o uso da seringa com bico em nutrição oral e enteral.

Indicações:

A seringa está indicada para administração de nutrição oral e enteral em extensões, sondas e sistemas de nutrição enteral que possuem conexão universal para encaixe de bico.

Descrição do produto:

Seringa plástica lilás, para identificação precisa de seu uso para administração de nutrição oral e enteral, com bico para conexão universal em sondas e sistemas, 60 ml.

Informação, precauções e restrições do produto:

- Esterilizado por óxido de etileno.
- Validade da esterilização: 05 anos.
- Para uso somente por pessoal autorizado e familiarizado com os procedimentos.
- Observe sempre a data de validade do produto.
- Estéril e apirrogênico somente se a embalagem não estiver aberta ou danificada.
- Técnicas rigorosamente assépticas devem ser usadas durante os procedimentos de conexão da seringa à extensões ou à sonda de gastrostomia e equipos.
- Armazene e transporte o produto em local seco e limpo, temperatura abaixo de 32 C e umidade abaixo de 75%.
- Proibido reprocessar de acordo com o item 57 da RE2605/2006.
- Descarte a seringa conforme item 8.1.2 da RDC 306, de 07 de Dezembro de 2004, da ANVISA.

Contra-indicações, efeitos adversos e complicações possíveis:

Não há.

Instruções de uso:

- Utilize técnicas estéreis durante os procedimentos descritos abaixo.
- Preencha a seringa com a nutrição prescrita utilizando uma conexão universal.
- Remova a tampinha de proteção do conector à extensão, sondas ou sistemas de nutrição enteral.
- Conecte a seringa à extensão, sonda ou sistema de nutrição enteral que possuem conexão universal ou diretamente na boca do paciente.
- Inicie a administração.

Informações técnicas:

Embalagem primária: um lado papel grau cirúrgico e o outro lado polietileno. Cada embalagem primária contém:

- 01 Seringa plástica para nutrição oral e enteral com bico 60 ml (seringa destinada à nutrição oral e enteral, não sendo de uso hipodérmico)

Fabricado por:

Medicina Ltd
Unit 2, Rivington View Business Park, Station Road
Bolton BL6 5BN – Reino Unido – Tel: 01204695050

Fornecedor:

HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-124
SAC:(31) 36881901 Fax: (31) 36881910
qualidade@medika.com.br
www.medika.com.br

Responsável técnico:

Enfª. Vanessa Alves dos Santos
COREN MG: 644.853-ENF

ANVISA nº: 10289689003

Legenda da simbologia da rotulagem:



REF

Lote
Data de
fabricação
Data de Validade
Referência

Versão da instrução de uso – Vr.02

Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido.

Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: qualidade@medika.com.br.

