

INSTRUÇÕES DE USO PARA A SERINGA PARA ADMINISTRAÇÃO ORAL E ENTERAL MEDICINA

Seringas

Introdução:

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos. Por favor, faça referência ao manual de procedimentos de sua instituição para checar os métodos aprovados para o uso da seringa para administração oral e enteral.

Indicações:

As seringas estão indicadas para aspiração e administração de soluções e nutrição por via oral e por via enteral em extensões, sondas e sistemas de nutrição.

Descrição do produto:

Seringa plástica lilás, para identificação precisa de seu uso para aspiração e administração de soluções e nutrição por via oral e enteral, com ponta slip. Disponível nos volumes com 1,2,5,10 e 20 ml. A seringa é reutilizável, em um mesmo paciente.

Informação e restrições do produto:

- Esta seringa é reutilizável somente em um mesmo paciente, por até 7 dias ou por até 40 lavagens, o que ocorrer primeiro.
- Não utilize esse produto se a embalagem estiver danificada.
- Para utilização somente por pessoal autorizado e/ou familiarizado com os procedimentos.
- Limpe a seringa conforme instruções descritas.
- Técnicas assépticas devem ser usadas durante a utilização desta seringa.
- A utilização da seringa é transitória (< 60 min.)
- Observe sempre a data de validade do produto.
- Leia todas as instruções cuidadosamente antes de utilizar a seringa.
- Armazene e transporte o produto em local seco e limpo e em temperaturas abaixo de 32°C.
- Descarte o produto conforme RDC 222 de 28 de março de 2018, da ANVISA.

Advertências e precauções:

- Não force a infusão da nutrição se encontrar resistência.
- A seringa é destinada para nutrição oral e enteral, não sendo destinada para uso hipodérmico.
- Se a graduação da seringa desaparecer ou se o pistão oferecer resistência ao ser puxado, descarte a seringa e utilize uma nova seringa.

Instruções para a limpeza da seringa: (imediatamente após o uso)

- Retire o pistão da seringa e lave ambos com sabão neutro diluído em água morna.
- Enxague abundantemente com água fria ou em temperatura ambiente.
- Seque a ambas as partes separadas da seringa com toalha de papel.
- Guarde as partes separadas da seringa em um recipiente limpo com tampa.
- Não utilize água fervente, escovas, estufa, tecidos na limpeza, pois podem comprometer o funcionamento da seringa.

Contra indicações:

Não utilize essa seringa para infusões venosas.

Complicações:

- Não se aplica

Instruções de uso:

- Utilize técnicas estéreis durante os procedimentos descritos abaixo.
- Preencha a seringa com a nutrição ou solução prescrita.

- Conecte a seringa à extensão, sonda ou sistema de nutrição enteral escolhida ou diretamente na boca do paciente.
- Inicie a administração.
- Proceda a limpeza da seringa conforme instruções de limpeza.

Informações técnicas:

Embalagem secundária: caixa de papel cartão 350g/cm. Cada embalagem secundária contém 80 ou 100 embalagens primárias.

Embalagem primária: Embalado em um lado papel grau cirúrgico e outro lado polietileno.

-Cada embalagem primária contém:

01 Seringa plástica para administração oral e enteral xx ml, com ponta slip, graduada em yy ml (seringa destinada ao uso oral e enteral, não sendo de uso hipodérmico)

Código	Volume da seringa	Graduação
--------	-------------------	-----------

OTH01	1 ml	0,01 ml
OTH25	2,5 ml	0,1 ml
OTH05	5 ml	0,2 ml
OTH10	10 ml	0,5 ml
OTH20	20 ml	1,0 ml

Fabricante:

Medicina Ltd.

Unit 2, Rivington View Business Park, Station Road -Bolton BL6 5BN

Tel: 01204695050 – Reino Unido

Fornecedor:

HTS—Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda

Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-124

SAC:(31) 36881901 Fax: (31) 36881910

ANVISA: 10289680221

Responsável técnico:

Enfª. Vanessa Alves dos Santos

COREN MG: 644.853-ENF

Legenda da simbologia da rotulagem:



Lote



Data de fabricação



Data de Validade

REF

Referência

Versão da instrução de uso – Vr.02

Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido. Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: qualidade@medika.com.br