

INSTRUÇÕES DE USO PARA A BOLSA COLETORA PARA DRENAGEM DE FLUIDOS NO PARTO _ NVBZ01

Bolsa coletora

Introdução:

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos. Por favor, faça referência ao manual de procedimentos de sua instituição para checar os métodos aprovados para o uso da bolsa coletora de fluidos no parto.

Indicações:

A bolsa está indicada para coletar, verificar o volume com precisão e armazenar fluidos teciduais decorrentes do parto, para o descarte de forma adequada ou para coletar e verificar com precisão o volume do sangramento pós parto.

Descrição do produto:

A bolsa coletora é fabricada em polietileno, com 79 cm de comprimento, graduada a cada 50, 100 e 500 ml, com um plástico interno perfurado para retenção de gazinhas e esponjas, com fechamento para transporte e descarte. A bolsa coletora está integrada a um campo cirúrgico composto por base em airlaid, absorvente, com 41 cm de largura e laterais em polietileno azul, com 99 cm de largura e aberturas para o encaixe das mãos do operador. O produto descartável é posicionado na mesa de parto.

Informação, precauções, advertências e restrições do produto:

- Estéril e apirogênico somente se a embalagem não estiver aberta ou danificada.
- Esterilizado a óxido de etileno.
- Validade da esterilização: 03 anos
- A lei restringe o uso deste material sob indicação de um médico.
- Produto de reprocessamento proibido conforme item 05 da RE 2605 de 2006.
- Técnicas rigorosamente assépticas devem ser usadas durante os procedimentos de colocação, manutenção e remoção da bolsa.
- Para a verificação do sangramento pós parto, não permita que fezes, urina e líquido amniótico penetrem na bolsa coletora.
- A utilização da bolsa é de curto prazo.
- Armazene e transporte o produto em local seco, limpo, protegido da luz, em temperaturas menores que 32°C.
- Leia todas as informações antes de utilizar a bolsa coletora.
- Descarte a bolsa e fluidos conforme a RDC 306, de 07 de dezembro de 2004, da ANVISA.

Contra indicações:

Não se aplica.

Efeitos Adversos:

Não se aplica.

Instruções de uso:

- Utilize técnicas assépticas durante os procedimentos descritos abaixo: isto inclui o uso de luvas, máscara, campos e instrumentos estéreis.
- Abra a embalagem verifique a integridade da bolsa coletora.
- Posicione o campo cirúrgico na mesa de parto, de forma que a bolsa fique livre e lacrada, na borda da mesa de parto (figura 1).
- Posicione a base do campo cirúrgico em airlaid por baixo do local onde a parturiente apoiará as nádegas (figura 2).
- Quando necessário, abra a bolsa coletora pela haste azul, de maneira que ela fique bem aberta para coletar fluidos (figura 3).
- Para a verificação do sangramento pós-parto, abra a bolsa coletora após o parto e a retirada da placenta. Neste caso, fluidos como urina, fezes e líquido amniótico não devem entrar na bolsa coletora, somente sangue e coágulos. (Figura 4)
- O plástico interno perfurado irá reter gazinhas e esponjas que acidentalmente penetrem na bolsa coletora.
- Mantenha a bolsa coletora para sangramento pós-parto pelo tempo desejado.
- Verifique o volume de sangue armazenado e anote (figura 5).
- Para remover a bolsa coletora e campo cirúrgico, após a saída da parturiente, encaixe as mãos de cada lado das laterais da bolsa coletora para o descarte em local apropriado.
- Descarte a bolsa e os fluidos de acordo com o protocolo do hospital e em atendimento à RDC 306 de Dezembro de 2004.

Informações técnicas:

Embalagem secundária: caixa de papel couché (composto de papel base, caulim, carbonato de cálcio e látex) 500g/cm. Cada embalagem secundária contém 50 embalagens primárias.

Embalagem primária: Embalado em um lado papel grau cirúrgico gramatura 80 gm² e o outro lado transparente em PEAD (polietileno de alta densidade). Cada embalagem primária contém:

01 bolsa coletora para drenagem de fluidos no parto, em polietileno, com capacidade para 5.000 ml, graduada, em um campo cirúrgico composto por uma base em airlaid, com 41 cm e laterais em polietileno azul, 99 cm.



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Figura 4



Figura 5



Figura



Fabricado por:

Zhejiang Mediunion Healthcare Group Co. Ltd
F11, 167 Yening stree, Yinzhou district, Ningbo 315000 - China

Fornecedor:

HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230 124
SAC:(31) 36881901 Fax: (31) 36881910
E-mail: qualidade@medika.com.br

Responsável técnico:

Enfª. Vanessa Alves dos Santos
COREN MG: 644.853-ENF

ANVISA nº: 10289689012

Legenda da simbologia da rotulagem:



Lote



Data de fabricação



Data de Validade

REF

Referência



Esterilizado a Óxido de etileno

Versão da instrução de uso – Vr.02

Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido.
Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: qualidade@medika.com.br.