



Cateter Balão

para Tamponamento Uterino BT-Cath

Informações técnicas:

Indicado para controle temporário ou redução do sangramento uterino durante a hemorragia pós-parto (HPP), quando não há uma resposta à terapia padrão, que inclui massagem e administração de ocitocina.


O cateter é introduzido pela vagina até o útero após o parto normal ou por meio de uma incisão após o parto cesáreo. Ele é utilizado para controlar temporariamente ou reduzir o sangramento uterino no pós-parto, através do balão insuflado.

Fabricado em silicone radiopaco duplo lúmen, sendo uma via para insuflação do balão com o objetivo de tamponar o útero por meio de balão macio, e uma via para drenagem de sangue intrauterino. Com diâmetro externo de 85 mm e comprimento de 55 cm, o balão é fabricado em silicone, e possui capacidade máxima de até 500 ml. Na extremidade proximal, possui conector de quatro vias, sendo uma delas equipada com uma válvula anti refluxo para insuflação do balão, outras para drenagem de sangue intrauterino.

Acompanha duas seringas com conexão Luer lock (não destinado para uso hipodérmico) de 60 ml e um conector perfurante para bolsa de infusão com válvula anti-refluxo.

- O material de silicone macio do balão BT-Cath permite que ele se adapte a forma interna do útero;
- São disponibilizadas duas seringas para administração de infusão contínua de solução salina, permitindo uma expansão rápida do tamponamento;
- Possui via de drenagem nivelada, sem tubos salientes, que facilitam a colocação segura do cateter e também a avaliação da perda de sangue;
- Não requer nenhuma operação cirúrgica para remoção.

O uso do cateter é de curto prazo, com duração máxima de 24 horas.

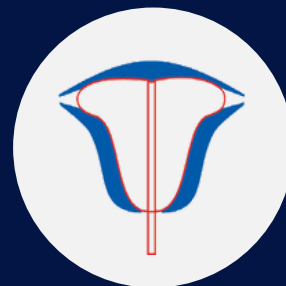



Cateter Balão

para Tamponamento Uterino BT-Cath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
BTC-100	01 cateter em silicone, 85 mm de diâmetro externo x 55 cm de comprimento, com um balão em silicone, com capacidade máxima de até 500 ml, com um conector de quatro vias na extremidade proximal, uma com válvula anti refluxo, para insuflação do balão. 02 seringas de 60 ml com conexão Luer lock, para insuflação do balão, não sendo destinado ao uso hipodérmico. 01 conector perfurante para bolsa de infusão com válvula anti-refluxo.

