



Dilapan-S


Informações técnicas:

Indicado para amaciar e dilatar o colo do útero antes de procedimentos ginecológicos, como no amadurecimento do colo do útero, no preparo cervical em preparação para a indução do parto, para a interrupção da gestação ou em outras intervenções na cavidade uterina, por até 24 horas.

Fabricado em hidrogel anisotrópico chamado Aquacryl® patenteado, o dilatador cervical higroscópico é uma haste que aumenta de diâmetro à medida que absorve a umidade do trato genital. Normalmente, 3 a 5 hastes são inseridas em um procedimento único, com as hastes inseridas uma de cada vez. Composto por uma parte dilatadora (haste), um cabo de polipropileno e um cordão indicador amarrado com segurança ao cabo do DILAPAN-S® para indicar sua localização. Cada haste Dilapan-S é um dilatador cervical estéril, embalada individualmente, descartável e de uso único. Disponível em caixas contendo 10 ou 25 dilatadores, nas dimensões de 3 mm x 55 mm, 4 mm x 55 ou 65 mm.

- Dilatação mecânica cervical de forma gradual, com pouco ou nenhum desconforto, o que possibilita ao paciente executar suas atividades normalmente;
- Dilatador cervical mecânico não farmacológico;
- Podem ser inseridos mais de um DILAPAN-S® no canal cervical, caso o profissional de saúde considere adequados após avaliação clínica do risco/benefício;
- Seguro e efetivo, mesmo em mulheres com histórico de cesárea.

Dilapan-S não contém látex.

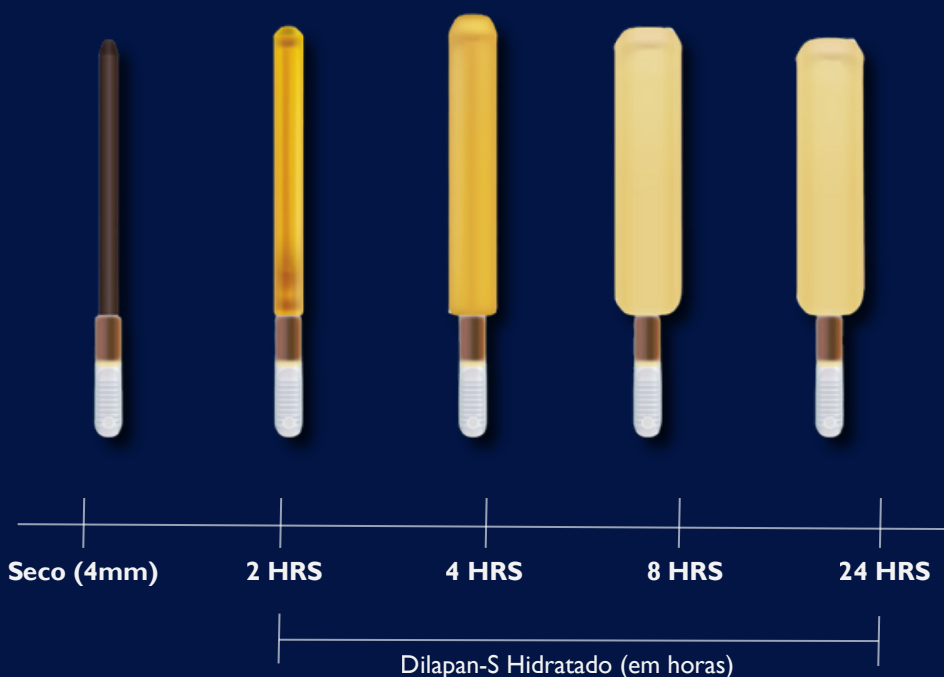



Dilapan-S

TEMPO (em horas)	DILATAÇÃO ESPERADA (em mm)	
	UM DILAPAN-S® (3mm)	UM DILAPAN-S® (4mm)
2	7,2 - 8,3	7,8 - 10,0
4	8,4 - 9,5	10,0 - 11,2
6	9,0 - 10,0	10,1 - 12,5
24	9,6 - 11,3	12,7 - 14,6

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
DS465	O DILAPAN-S® está disponível em caixas com 10 ou 25 dilatadores no tamanho 4 mm x 65 mm.
DS455	O DILAPAN-S® está disponível em caixas com 10 ou 25 dilatadores no tamanho 4 mm x 55 mm.
DS355	O DILAPAN-S® está disponível em caixas com 10 ou 25 dilatadores no tamanho 3 mm x 55 mm.

