



Extrator Obstétrico a Vácuo

Descartável KIWI

Informações técnicas:

Indicado em partos normais quando a gravidez é a termo, membranas amnióticas rotas, polo cefálico encaixado e dilatação cervical completa. Além disso, o extrator obstétrico pode ser usado em diversas situações, como quando ocorre falha no parto normal após medidas temporárias no segundo estágio, quando há relações adaptadas entre o feto e a pelve, em casos de exaustão materna, em situações em que o segundo estágio do trabalho de parto não é recomendado, em casos de descolamento prematuro de placenta, falta de cooperação, uso excessivo de analgesia, inércia uterina, atividade de contração forçada ou em casos de prolapso de cordão fetal e apresentação occipital posterior. Também pode ser utilizado em situações em que há um risco presumido para o feto que não é considerado grave, quando há necessidade de encurtar o segundo estágio do parto por indicação materna ou fetal, como uma tentativa de extração obstétrica no parto normal quando a apresentação do bebê para de descer no segundo estágio e a relação entre o feto e a pelve é considerada limite, ou ainda na extração na parte mais estreita da pelve quando a posição é conhecida, ou quando o risco presumido para o feto é considerado maior.



Fabricado em policarbonato e com revestimento interno em poliéster, o extrator obstétrico a vácuo Kiwi é um dispositivo descartável de baixo perfil, disponível em dois modelos: o OmniCup, indicado para parto vaginal, e o modelo Omni C Cup, projetado especificamente para parto cesáreo, adaptando-se ao espaço abdominal restrito. Ele é composto por uma cúpula fetal de 56 mm de diâmetro por 15 mm de altura (OmniCup) ou 56 mm de diâmetro por 10,5 mm de altura (Omni C Cup), juntamente com uma bomba de vácuo que possui um medidor de pressão e um botão de liberação de vácuo. A bomba, fabricada em policarbonato, é manipulada com a palma da mão, permitindo o controle completo por um único operador. O medidor de pressão apresenta indicadores de pressão negativa em Bar, mmHg, inHg e KPa.

- A haste flexível e a cúpula ajudam a garantir que seja colocada sobre o ponto de flexão, independentemente da posição da cabeça fetal;
- Menor índice de sangramento quando utilizado em cesarianas;
- Equipamento seguro utilizado em mais de 90 países;
- A tecnologia **PalmPump™** coloca o controle completo nas mãos de um único operador;
- A cúpula do Omni Cup C possui duas orientações para o apoio dos dedos, facilitando sua manipulação e auxiliando na localização no ponto de flexão.



Extrator Obstétrico a Vácuo

Descartável KIWI

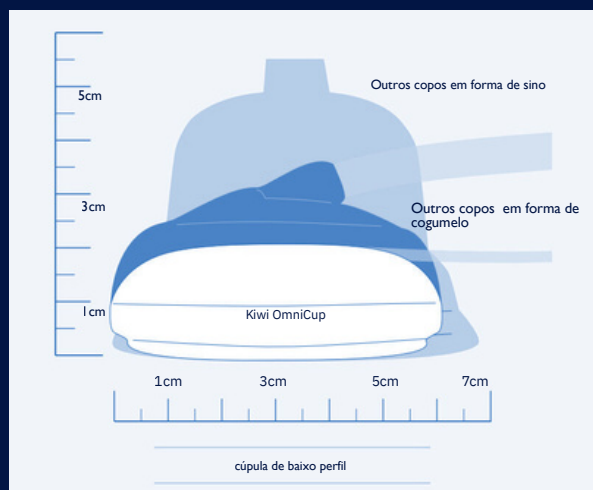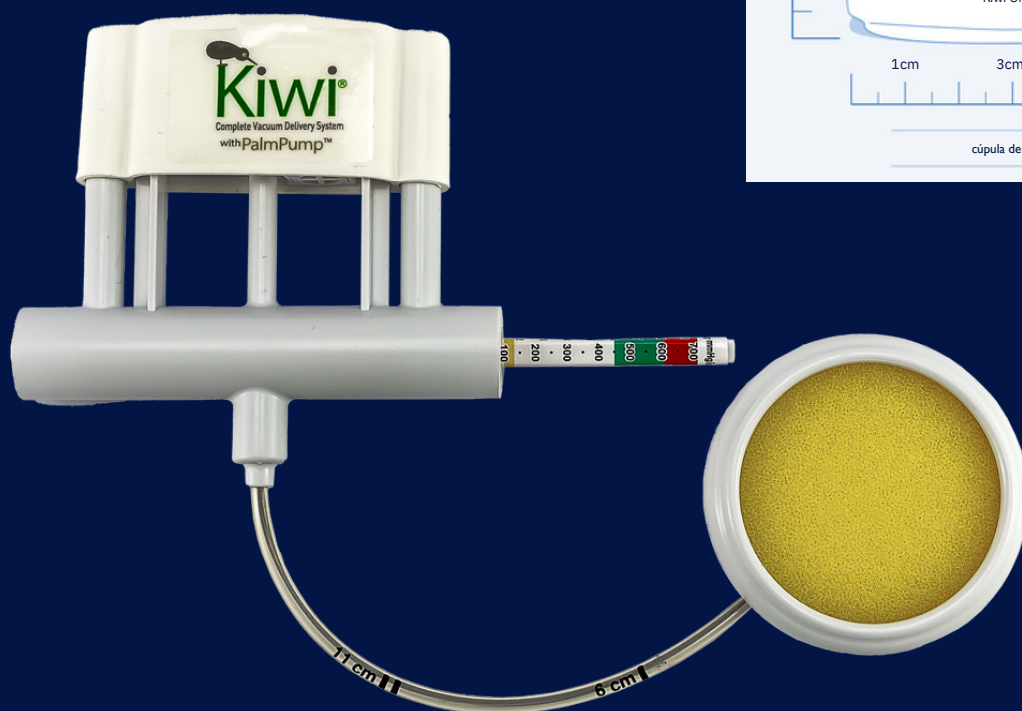

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
VAC-6000M	01 extrator obstétrico descartável composto de cúpula de 56 mm x 15 mm e bomba a vácuo com medidor.
VAC-6000C	01 extrator obstétrico descartável composto de cúpula de 56 mm x 10,5 mm, baixo perfil e bomba a vácuo com medidor.

